



INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS PARA EL ESTUDIO DE ANTICUERPOS ANTI-MOG

Muestra a enviar:

SUERO: Se requieren al menos 2 alícuotas de 500-1000 mL de suero.

Almacenamiento. La sangre debe extraerse en tubos secos. Las muestras deben ser alicuotadas y <u>congeladas</u> el mismo día de su obtención, y <u>enviadas en hielo seco</u> para evitar su descongelación. Si el envío se realiza el mismo día de la extracción, podrán enviarse en un envase refrigerado (con gel frío) sin congelar; el envío deberá realizarse antes de las 17.00 PM).

Envío. Se avisará del envío mediante correo electrónico (jescas732@gmail.com) a la responsable de la técnica (Jéssica Castillo) antes de que se efectúe la recepción de las muestras.

Las muestras se enviarán debidamente identificadas (fecha y hora de recogida, hospital y servicio, dirección y teléfono, persona de contacto) a la atención de Jéssica Castillo a la siguiente **dirección**:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE Laboratorio de Neuroinmunología y regenración neural. 5-20 Torre A, 5ª planta Avd Abril Martorell 162 Valencia, 46026 España

Para cumplir con la ley de protección de datos, se ruega identificar las muestras con números de laboratorio o historia, evitando asociar datos personales de los pacientes.