





INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS PARA BANDAS OLIGOCLONALES IgM

Muestras requeridas:

- **SUERO** (no plasma): 1 tubo (mínimo 1 mL de muestra)
- **LCR**: 1 tubo para líquidos biológicos, sin aditivos (mínimo 20 gotas)

Es importante que sangre y LCR se extraigan al mismo tiempo y se envíen el mismo día. Si no es posible, deben almacenarse en nevera y enviarse lo antes posible (al día siguiente a primera hora) en recipiente refrigerado, antes de las 12 horas.

En el volante de la petición se ha de hacer constar que se solicitan las bandas oligoclonales IgM. Asimismo, para posibles consultas sobre los pacientes o las muestras, indicar en la petición el nombre del médico solicitante, así como un teléfono de contacto o correo electrónico.

Si el hospital peticionario es ya cliente de la Fe, el envío de resultados se hará por la vía ordinaria. En caso contrario, por favor, solicitar al Laboratorio de la Fe el alta como cliente.

Las muestras se enviarán a:

Hospital Universitari i Politècnic La Fe Laboratorio de análisis clínicos: Recepción de muestras Planta Baja, Torre B Avda. Fernando Abril Martorell, 106 46026, Valencia

Fdo.: Jéssica Castillo Villalba

Extensión: 246657 / 244845